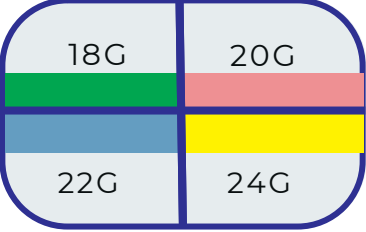
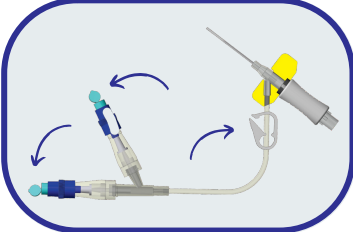


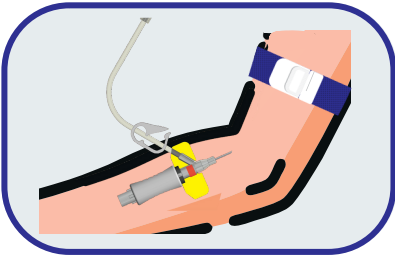
DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFÉRICO SAFETY VALVULADO

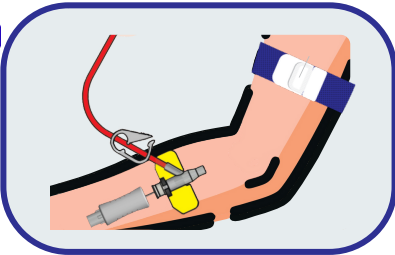
ATA de R.P. - Nº 250/2023 - SMS.G

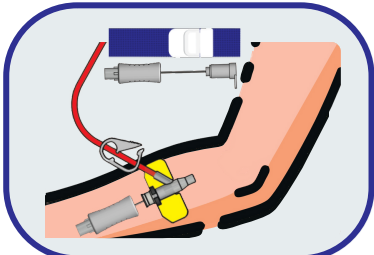
- 

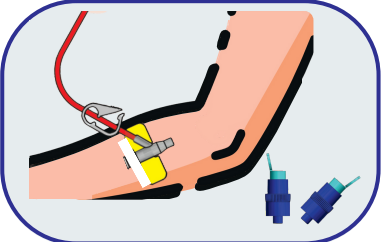
Avaliar condição venosa do paciente e escolher o calibre mais adequado.
- 

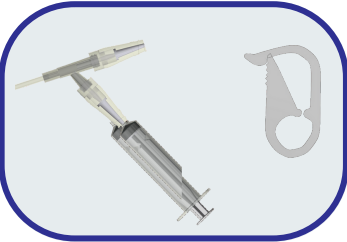
Ao retirar o cateter da embalagem, verifique se o clamp e os filtros estão abertos.
- 

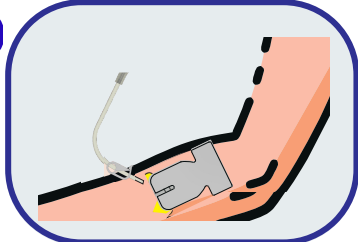
Garrotear o membro e realizar a antissepsia da pele na região onde será feita a punção.
- 

Realizar a punção venosa com o bisel voltado para cima.**
- 

Avançar com o cateter na veia e retirar a agulha, simultaneamente até o acionamento do dispositivo com um "click".
- 

Observar o sistema ser preenchido com o sangue e retirar o garrote.
- 

Estabilizar o cateter com a tira que acompanha o adesivo de fixação*. Retirar e descartar os filtros.
- 

Conectar a seringa com solução fisiológica 0,9% e realizar o flushing para lavagem do acesso*. Ao fim, fechar o clamp.
- 

Realizar a fixação do cateter e a identificação do acesso*.

* Conforme protocolo da instituição.

** A angulação da punção pode variar de 15° a 45° dependendo do tipo e condições do paciente.

- DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFÉRICO SAFETY VALVULADO 24 G X 19 MM - CÓDIGO SUPRI: 11. 65.003.001.0049-8
- DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFÉRICO SAFETY VALVULADO 22 G X 25 MM - CÓDIGO SUPRI: 11.065.003.001.0050-1
- DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFÉRICO SAFETY VALVULADO 20 G X 32 MM - CÓDIGO SUPRI: 11.065.003.001.0051-0
- DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFÉRICO SAFETY VALVULADO 18 G X 32 MM - CÓDIGO SUPRI: 11.065.00.001.0052-8

CUIDADOS ESPECIAIS



Deve ser manipulado por profissional técnico devidamente capacitado e habilitado.



Utilizar técnicas assépticas recomendadas conforme o protocolo institucional.



Verificar a validade do item bem como as condições da embalagem antes de utilizá-lo.



Seguir rigorosamente as instruções de uso preconizadas pelo fabricante.